

	Receveur fixe		Votre smartphone est le receveur			
	Birth Alarm Advanced (produit supprimé de l'assortiment 2022)	Birth Alarm Classic	Birth Alarm Premium Plus (Nouveauté 2022)	Birth Alarm Premium	Birth Alarm Mobile	Birth Alarm Lite 2.0
Référence	084524	510	086467	084548	025480	084555
<b>Emetteur</b>						
Distance maximale	500-700 m	500 m	∞	∞	∞	∞
Nombre d'émetteur possible	4	99	∞	∞	∞	∞
Contrôle des batteries/piles	4 (temps réel)	I (avec LED)	via l'application télégram	SMS	Avec LED	SMS
Contrôle de la réception	4 (temps réel)	I (alarme)		SMS		SMS
Nombre de numéro de portable configurables				4	2	2
Réglage de l'angle	Sur receveur			SMS		
Carte SIM nécessaire			•	•	•	•
Carte SIM tout opérateurs fournie			Validité 5ans			
Mise à jour possible	•		•	•		•
Montage sur le licol possible (Problèmes + réguliers)	•		•	•		•
Montage sur un surfaix anti-roulis	•	•	•	•	•	•
Robustesse	◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇	◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇
<b>Receveur</b>						
Alimentation	Batterie rechargeable	230v				
Tactile	•					
Possibilité de la connecter avec un téléphone fixe analogue		•				
Mise à jour possible	•					
Ajuster le son de l'alarme	•					
Mode éco	•					
Luminosité de l'écran	Auto/Manuel					
Fonction vibreur	•					
Déplacable	•					
Langues	NL/ENG/FRA/GE/SV	NL/ENG/FRA/GE				
<b>Modes</b>						
Mode sommeil	•	•	•	•	•	•
Mode Colique	•	•				
Mode anti-effraction	•					
<b>User-friendliness</b>						
Simplicité d'installation	◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇	◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇
Convient aux personnes ayant de faibles connaissances techniques	◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇	◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇
Convient aux personnes ayant des connaissances techniques	◇◇◇◇◇	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇
<b>Other</b>						
Taux d'erreur en 2020	n.y.a	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%
Créé en	2021	1990	2011	2011	2003	2012
Garrantie	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years

Birth Alarm Classic :

Peut être associé au sélectionneur téléphonique (529). Ce dernier permet de faire sonner n'importe quel téléphone lorsque le birth alarm se déclenche. Le sélectionneur téléphonique peut se brancher désormais sur une livebox.

Birth Alarm Premium Plus :

Dispose d'une meilleure antenne que le lite 2.0. La carte sim est déjà présente dans le birth Alarm. Le birth Alarm se retrouve connecté à l'application télégram et averti l'ensemble des personnes présentes dans le groupe.

## Birth Alarm : Choix de l'opérateur

### Bouygues télécom : difficulté \*

- Insérer carte SIM dans un téléphone
- Activer carte SIM
- Vérifier la quantité de crédit
- Supprimer messagerie
- Supprimer code PIN
- On suit la procédure. Il est possible de le paramétrer soit par appel, par sms soit en direct.
- Tester

### Orange : difficulté \*\*

- Insérer la carte Sim dans un téléphone
- Supprimer le code PIN
- Activer carte SIM
- Vérifier la quantité de crédit
- Désactiver la dépose des messages sur le répondeur :
  - o appeler la messagerie Orange au 888
  - o taper 2 = annonces d'accueil  
taper 2 = annonces personnelles  
taper 5 = annonce temporaire  
taper 2 = option "vos correspondants NE POURRONT PAS LAISSER DE MESSAGE"
  - o Enregistrez votre message d'accueil "temporaire" ;
  - o Terminer l'enregistrement en tapant #
  - o Puis tapez 1 pour valider, ou tapez 2 pour écouter ou recommencer l'enregistrement du message 'temporaire'.
  - o Si vous ne voulez pas enregistrer de "message temporaire" : juste après le bip de début d'enregistrement, ne dites rien et tapez # directement après 1 seconde
- Insérer la carte Sim dans le Birth Alarm
- Allumer le birth Alarm et laisser le tournevis devant jusqu'à la deuxième lumière bleu puis enlever le tournevis
- Appeler le birth alarm en laissant sonner entièrement
- La lumière bleu devient verte de manière alternative, rappeler et raccrocher à la première seconde.
- Le birth alarm doit rappeler
- Tester

### SFR : difficulté \*\*\*

- Insérer carte SIM dans un téléphone
- Supprimer le code PIN
- Activer la carte SIM
- Ouvrir le répondeur en tapant 123
- Désactiver la dépose des messages sur le répondeur :
  - o Puis \*
  - o Puis 3
  - o Puis 6
  - o Puis 1
- Créer les contacts en direct comme convenu dans le manuel
  - o « M1 »
  - o +33 (suivit du numéro de portable sans le 0)
- Insérer la carte SIM dans le birth alarm
- Tester